

Checkliste Einweisung Fachkreise

t:slim X2™ Insulinpumpe mit Basal-IQ™ Technologie

Softwareversion

Die t:slim X2 Insulinpumpe verstehen und einsetzen

Pumpe ein-/ausschalten und allgemeine Navigation

- Pumpe an Stromquelle anschließen
- Bedienung des Touchscreen
- Sprache wählen
- Startbildschirm und Home-, T"-Taste
- Vorstellung der Symbole auf dem Touchscreen

Optionen

- Mein CGM (ggf. Dexcom-Empfänger abschalten)
- Transmitter-ID eingeben, Sensorcode
- CGM-Warnungen mit Bereichswarnung
- temporäre Basalrate einstellen

Geräteeinstellungen

- Anzeigeneinstellungen: Bildschirm-Abschaltung, Sprache
- Bluetooth® Einstellungen
- Uhrzeit und Datum
- Lautstärke (CGM und Pumpe)
- Sicherheits-PIN

Verlauf

- Pumpenverlauf: Insulinabgabe, Gesamt Tagesdosis, Bolus, Basal, Reservoirwechsel, BZ-Wert, Warnungen und Alarmer, Basal-IQ, Gesamt
- CGM-Verlauf: Sitzungen und Kalibrierungen, Warnungen und Fehler, Gesamt

Meine Pumpe

- persönliche Profile
- **Basal-IQ:** an/aus, Warnungen unterbrechen und fortsetzen
- Pumpenerinnerungen: BZ niedrig, BZ hoch, BZ nach Bolus, Mahlzeiten-Bolus versäumt
- Pumpenwarnungen: Füllstand niedrig, Auto-Abschaltung
- Pumpeninformationen: Seriennummer, Kundenservice

Persönliche Profile

Pumpeneinstellungen

- Sofortbolus: Gramm/Insulineinheiten, Einstellschritte
- Max. Bolus, Basal-Grenze

Profil

- Zeitsegmente: Basalrate, Korrekturfaktor, KH-Faktor, Ziel-BZ
- Boluseinstellungen: Insulindauer, KH ein/aus
- Persönliches Profil bearbeiten erstellen ändern, aktivieren, kopieren, löschen, umbenennen

Bolus

- Mahlzeitenbolus: Eingabe Gramm Kohlenhydrate oder Insulineinheiten Berechnung anzeigen, Bolus abrechnen
- BZ-Wert eingeben
- Verlängerter Bolus: einstellen und abrechnen
- Kombierter Bolus: einstellen und abrechnen
- Sofortbolus abgeben
- Bolusrechner mit und ohne aktivem Insulin

Reservoir und Infusionssets

- Reservoir befüllen und wechseln
- Schlauch und Kanüle füllen, Erinnerung Wechsel
- Infusionsset setzen und wechseln
- Infusionssets: Unterschiede und Handhabung
- Zugelassene Insuline: U-100 Insulin Humalog, NovoRapid, Admelog/Insulin lispro Sanofi®
- Haltbarkeit des Insulins: NovoRapid, Humalog, Admelog/Insulin lispro Sanofi®

Allgemeines

- Tragemöglichkeiten
- Wasserdichtigkeit
- Hotline und Bestellungen

Unterschrift geschulte Person

Ich bestätige, dass ich in den obigen Punkten geschult wurde und den Verwendungszweck sowie sicheren Gebrauch uneingeschränkt verstanden habe.

Geschulte Person

✗ _____
Unterschrift

Datum

Unterschrift zertifizierter Pumpentrainer

Ich bestätige hiermit, dass ich zu den obigen Punkten eine Schulung durchgeführt und die Einzelheiten genau dokumentiert habe.

Zertifizierter Pumpentrainer

✗ _____
Unterschrift

Datum